


SUOJAVISIIRI NESTEPISAROILTA JA -ROISKEILTA SUOJAUTUMISEEN COVID -19 EPIDEMIAN AIKANA.

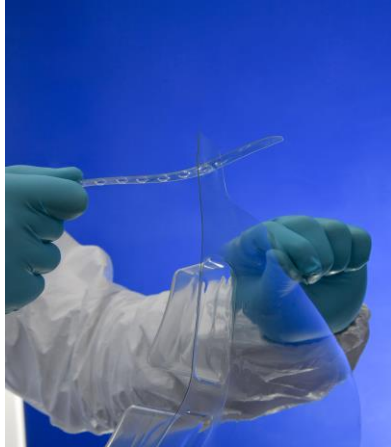

01

1. Aseta kiristyshihna uraan



02

2. Aseta Face Shield -suoja pään yli



03

3. Kiristä ja taita panta taaksepäin.



04

4. Käyttövalmis

05

5. Käytön jälkeen hävitettävä asianmukaisesti

MARVAN[®] FACE SHIELD

Valmistaja: Satatuote Oy
Susivuorentie 2, 26100 Rauma
Tel. 010 833 6700
info@satatuote.com



SATATUOTE
THERMOFORMING
Forming Success

- Marvan Face Shield – kasvosuojain
 - Suojavisiiri nestepisaroilta ja -roiskeilta suojautumiseen COVID -19 epidemian aikana.
 - Ratkaisu kasvojen suojaamiseksi suorilta roiskeilta.
 - Kasvosuojaimen hävitettävä erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
 - Visiirin materiaali voidaan kierrättää 100 %:sti muovinkierrätyksessä.
 - Naarmuuntunut tai vahingoittunut visiiri tulee vaihtaa.
 - Suojain ei suojaa lentäviltä kiinteiltä kappaleilta.
 - Tuotteen käyttöikä 12 kk
 - CE-merkitty

- Visiirin Merkinnät
 - Valmistajan tunniste: 412171
 - Valmistajan tunnus: Marvan Face Shield
 - Optinen luokka: 1
 - Mekaaninen lujuus: S
 - Käyttökohde: 3
COVID-19

Visiirin materiaali

- Elintarvikehyväksytty D-PET-muovi
- Materiaalipaksuus 0,50 mm

Visiirin puhdistus

- Visiirin materiaali kestää pintojen puhdistamisen laimennetulla etanolilla.

Visiirin varastointiolosuhte:

- Tuote tulee olla varastoituna valolta suojassa.
- Pitkäkestoinen voimakkaalle UV-valolle altistaminen heikentää materiaalin ominaisuuksia.
- Ilmankosteus < 60 %
- Lämpötila – 5 C - + 40 C