



Nocotest

Hygieniatesti



Nocospray suurtehosumuttimen kanssa käytettävät testiliuskat vetyperoksidikuivahöyryn leviämisen todentamiseen.

Käyttökohteet

Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfektio menetelmä suljetuissa sisätiloissa, kuten huoneet, työtilat, ambulanssit jne.

Desinfektio menetelmää suositellaan käytettäväksi siivouksen jälkeen. Erikoistilanteissa, esim. mikäli toimenpiteen tarkoituksena on henkilökunnan altistumisen ehkäisy, vetyperoksidisumutus voidaan tehdä siivousta edeltävänä toimenpiteenä.

Liuskosten värimuutos ilmaisee vetyperoksidikuivahöyryn leviämisen käsiteltävässä tilassa.

Käyttö- ja annostusohje

Nocotest-kontrolliliuskat: Ennen vetyperoksidikuivasumutusta kostuta liuskoja vedellä ja aseta niitä paikkoihin, joiden desinfiointi näyttää hankalimmalta. Liuskosten väri muuttuu, kun desinfiointiin tarvittava määrä kuivasumutettua vetyperoksidiä osuu niihin. Pakkaus sisältää 100 kpl.

Huomioitavaa

Säilytä tuotepakkaus vetyperoksidikuivahöyryltä suojattuna.

Varastointi

Lämmin varasto, >5 °C- <30 °C

Valmistusmaa

RANSKA

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 100 kpl	8079	



Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.